

1- Instruções de Uso Suporte para Costas BOA

Modelos Classic e Chair back

Ajuste inicial: (para ser executada por um médico licenciado somente) (Assegurar de usar embaixo uma camiseta de algodão).

1) Enquanto estiver em pé, abrir ambos os painéis do anterior/lateral de Velcro. Abaixar o suporte na posição. Manter a cabeça do paciente entre as tiras dos dois ombros. Deixar o Painel Anterior e o Painel Posterior suspensos sobre o torso. Assegurar de manter a borda do fundo do painel anterior alinhado com a sínfise púbica e o painel posterior alinhado entre a espinha escapular e o glúteo médio.

2) Assegurar de manter a borda do fundo do painel anterior com a sínfise púbica e o painel posterior entre a espinha escapular e o glúteo médio. Usar as tiras anteriores (tão perto para soltar rápido a fivela) para fino ajuste.

3) Agora fechar ambos os painéis laterais de compressão de tal forma que eles estão alinhados e confortavelmente apertados no painel Anterior.

4) Para ativar a compressão, segurar cada um dos dois puxadores manuais, simultaneamente puxar ambos direto para fora do torso. Após que o nível desejado de compressão ter sido alcançado, apertar as alças de puxar para a porção anterior dos painéis de compressão. Para evitar o emaranhamento dos cordões do laço, posicionar uma alça de puxar mais acima no painel lateral do que a outra. Ajustar a compressão após 5 minutos, então reajustar se necessário.

Remoção do Suporte

5) Levantar e soltar ambas as alças de puxar nos painéis de compressão simultaneamente para soltar a compressão. Para auxiliar este processo, empurrar fora do abdomen, permitindo que as alças de puxar deslizem de volta para a sua localização original.

6) Agora soltar um lado do painel de compressão lateral e despinçar a fivela de soltura rápida.

Reaplicando o Suporte:

7) Colocar o suporte na posição apropriada. Reacoplar a fivela de soltura rápida na tira do ombro. Fechar o painel anterior e os painéis laterais de compressão como instruído no passo nº 4 acima.

8) Os painéis rígido, anterior e posterior são feitos de plástico termomoldável, de tal forma que podem ser moldados por calor ou cortados para fornecer um ajuste customizado.

a) Remover os painéis rígido, anterior e/ou posterior de plástico termomoldável de seus respectivos receptáculos flexíveis.

b) Os painéis podem ser customizados por termomoldagem e/ou raspagem.

Instruções de limpeza:

Separar os painéis termomoldáveis e a cobertura da almofada do esterno do dispositivo antes de limpar. As partes plásticas, almofadas são lavados manualmente com sabão neutro em água fria. Enxaguar completamente, secar com toalha então secar com ar seco completamente. Se não secar totalmente, o resíduo de sabão pode causar irritação de pele e estragar o material.

Advertência: O fabricante, reparará ou trocará toda ou parte da unidade e seus acessórios para defeitos de material ou de fabricação para um período de seis meses a partir da data de venda.

Nota

Embora todo o esforço tem sido feito nas técnicas STATE-OF-THE ART para obter o máximo de compatibilidade de função, força, durabilidade e conforto, este dispositivo é somente um elemento no

programa de tratamento total administrado por um profissional médico. Não há garantias que lesões serão prevenidas através do uso deste produto.

2- Instruções de Uso Suporte para Costas Modelo BOA Duel TLSO

Ajuste inicial: (para ser executada por um médico licenciado somente) (Assegurar de usar embaixo uma camiseta de algodão).

1) Enquanto estiver em pé, abrir ambos os painéis do anterior/lateral de Velcro. Com as tiras de ombro acopladas e estendidas no comprimento máximo, deixar o TLSO sobre a cabeça do paciente. Abaixar o TLSO na posição. Manter a cabeça do paciente entre as tiras dos dois ombros. Deixar o Painel Anterior e o Painel Posterior suspensos sobre o torso. Assegurar de manter a borda do fundo do painel anterior alinhado com a sínfise púbica e o painel posterior alinhado entre a espinha escapular e o glúteo médio.

2) Para ajustar as tiras do ombro, soltar e primeiro ajustar as tiras posteriores de Velcro. Ajustar ao comprimento desejado. Assegurar de manter a borda do fundo do painel anterior com a sínfise púbica e o painel posterior entre a espinha escapular e o glúteo médio. Usar as tiras anteriores (tão perto para soltar rápido a fivela) para fino ajuste.

3) Agora fechar ambos os painéis laterais de compressão de tal forma que eles estão alinhados e confortavelmente apertados no painel Anterior.

4) Ajustar a barra do ESTERNO em Y enquanto o paciente estiver sentado na postura prescrita. Puxar nas costas o botão de soltura (na porção superior do painel Anterior) para soltar a trava da barra do esterno em Y. Deslizar a barra barra do esterno em Y na posição, de tal forma que o topo da almofada do esterno ajuste ½ “ abaixo do encaixe do esterno. Assegurar de manter a borda de fundo no Painel Anterior alinhado com a sínfise púbica. (Se desejado, o suporte do esterno pode ser travado no lugar por desaparafusamento do parafuso de trava – externa do esterno fornecido localizado 2” abaixo do botão de soltura. Remover o parafuso em sua localização atual e colocar no orifício que está alinhado com o suporte.)

5) Para ativar a compressão, segurar cada um dos dois puxadores manuais, simultaneamente puxar ambos direto para fora do torso. Após que o nível desejado de compressão ter sido alcançado, apertar as alças de puxar para a porção anterior dos painéis de compressão. Para evitar o emaranhamento dos cordões do laço, posicionar uma alça de puxar mais acima no painel lateral do que a outra. Ajustar a compressão após 5 minutos, então reajustar se necessário.

Remoção do TLSO

6) Levantar e soltar ambas as alças de puxar nos painéis de compressão simultaneamente para soltar a compressão. Para auxiliar este processo, empurrar fora do abdomen, permitindo que as alças de puxar deslizem de volta para a sua localização original.

7) Agora soltar um lado do painel de compressão lateral e despinçar a fivela de soltura rápida no mesmo lado.

Reaplicando o TLSO:

8) Colocar o BOA duel back na posição apropriada. Reacoplar a fivela de soltura rápida na tira do ombro. Fechar o painel anterior e os painéis laterais de compressão como instruído no passo n° 5 acima.

Customização do TLSO (para ser executado por somente um médico licenciado)

9) Os painéis rígido, anterior e posterior são feitos de plástico termomoldável, de tal forma que podem ser moldados por calor ou cortados para fornecer um ajuste customizado.

a) Remover os painéis rígido, anterior e/ou posterior de plástico termomoldável de seus respectivos receptáculos flexíveis.

b) Os painéis podem ser customizados por termomoldagem e/ou raspagem.

10. A Barra do Esterno pode ser inclinada quando necessário usando uma mesa com bordas fixas. Usando ambas mãos, inclinar a barra num modo vagaroso e controlado para ajustar o grau desejado de deslocamento. A barra do esterno do estoque é ajustado a 15°.

11. Os painéis de compressão laterais podem ser removidos e recolocados em diferentes locais para assegurar um ajuste apropriado.

Instruções de limpeza:

Separar os painéis termomoldáveis e a cobertura da almofada do esterno do dispositivo antes de limpar. As partes plásticas, almofadas e o dispositivo TLSO são lavados manualmente com sabão neutro em água fria. Enxaguar completamente, secar com toalha então secar com ar seco completamente. Se não secar totalmente, o resíduo de sabão pode causar irritação de pele e estragar o material.

Advertência: O fabricante reparará ou trocará toda ou parte da unidade e seus acessórios para defeitos de material ou de fabricação para um período de seis meses a partir da data de venda.

Nota

Embora todo o esforço tem sido feito nas técnicas STATE-OF-THE ART para obter o máximo de compatibilidade de função, força, durabilidade e conforto, este dispositivo é somente um elemento no programa de tratamento total administrado por um profissional médico. Não há garantias que lesões serão prevenidas através do uso deste produto.

3- Instruções de Uso Suporte para Costas Modelo BOA LITE

Instruções de aplicação e ajuste

1. Posicionar e apertar a alça de puxar o mais próximo possível dos painéis de compressão e estendendo totalmente o cordão.
2. A etiqueta acoplada serve como referência para a orientação correta do suporte, posicionar o suporte ao redor da cintura e apertar .
A alça de puxar estará no lado esquerdo. O forro macio estará contra o corpo.
3. Para o ajuste e compressão apropriados, centralizar a espinha entre os dois painéis laterais e posicionar simetricamente na cintura.
4. Para aplicar a compressão, segurar a alça de puxar e puxar para a direita. Após o nível desejado de compressão ser alcançado, apertar a alça de puxar para contatar as tiras nos painéis laterais.

Guia do Tamanho do Suporte
(Medida tomada na cintura)

Pequeno: 26" – 32"
Médio: 32" – 38"
Grande: 38" – 43"
X-Grande: 43" – 48"

Instruções de limpeza

Lavagem manual com água fria usando sabão neutro. Enxaguar completamente, secar com toalha e então secar com ar seco completamente. Se não secar totalmente, o resíduo de sabão pode causar irritação de pele e estragar o material.

4- Instruções de Uso Suporte para Costas Modelo BOA SI Belt

- 1- Posicionar e apertar a alças de puxar o mais próximo possível dos painéis de compressão e estender totalmente o fio.
- 2- Para o correto posicionamento do suporte, tomar como referência a etiqueta do suporte, e posicionar o suporte aproximadamente a 2,5 cm acima do grande trocanter (parte mais larga do quadril) e apertar. As alças de puxar ficarão do lado esquerdo. O tecido de revestimento macio ficará contra o corpo.

3- Para colocação e compressão adequadas, centralizar os dois painéis laterais e posicioná-los simetricamente sobre as costas.

4- Para aplicar compressão, segurar as alças de puxar com o polegar e o indicador. Após alcançar o nível desejado de compressão, apertar a alça de puxar até a tira de contato no painel lateral.

Instruções de Limpeza

Lavar manualmente as tiras e as almofadas com água fria e sabão suave. • Secar ao ar.

Enxaguar totalmente para retirar o sabão residual. Se não for retirado, o sabão residual poderá causar irritação e deteriorar o material.

5- Instruções de Uso Suporte para Costas Modelo Clavícula

1- Destruar o gancho e a alça de fechamento.

2- Posicionar o Suporte para Clavícula de forma que o centro do suporte esteja centralizado com as costas do paciente. Os anéis D devem se apoiar sobre a nuca do paciente.

3- Posicionar as tiras ao redor dos ombros passando por baixo dos braços e sobre as axilas.

Passar as tiras pelos anéis D.

4- Apertar as tiras para puxar os ombros para trás, a fechar as abas da presilhas da extremidade das tiras do suporte.

5- As conexões com os anéis D podem ser reposicionadas sobre o centro das tiras para mais suporte e conforto.

1- Advertências para Suporte para Costas BOA

Modelos Classic e Chair back

- Antes de usar o dispositivo, favor ler as seguintes instruções completamente e cuidadosamente.
- A aplicação correta é importante para o funcionamento apropriado do dispositivo.
- Se experimentar qualquer dor, inchaço, mudança de sensações ou quaisquer reações não usuais enquanto estiver usando este dispositivo, consultar o médico imediatamente. Se qualquer desgaste ou deterioração dos cordões for relatado, interromper o uso.
- Para uso somente em um paciente.
- Somente Rx.

2- Advertências para Suporte para Costas Modelo BOA Duel TLSO

- Antes de usar o dispositivo, favor ler as seguintes instruções completamente e cuidadosamente.
- A aplicação correta é importante para o funcionamento apropriado do dispositivo.
- Se experimentar qualquer dor, inchaço, mudança de sensações ou quaisquer reações não usuais enquanto estiver usando este dispositivo, consultar o médico imediatamente. Se qualquer desgaste ou deterioração dos cordões for relatado, interromper o uso.
- Para uso somente em um paciente.
- Somente Rx.

3- Advertências para Suporte para Costas Modelo BOA LITE

- Favor ler estas instruções completamente e cuidadosamente antes da aplicação deste suporte.
- A correta aplicação deste suporte é importante para a função apropriada.
- Se experimentar qualquer dor, inchaço, mudança de sensações ou quaisquer reações não usuais enquanto estiver usando este dispositivo, consultar o médico imediatamente. Se qualquer desgaste ou deterioração dos cordões for relatado, interromper o uso.

4 Advertências para Suporte para Costas Modelo BOA SI Belt

- Ler cuidadosamente a advertências e as instruções de uso/cuidado antes de usar.
- Este dispositivo não prevenirá ou reduzirá todos os danos. A reabilitação e a modificação de atividade são também uma parte essencial de um programa de tratamento seguro. Consultar seu médico sobre a segurança e nível de atividade enquanto estiver usando este suporte.

- Se for sentido aumento da dor, inchaço irritação da pele, ou quaisquer reações adversas enquanto estiver usando este produto, consultar imediatamente seu médico.

- Para uso somente em um único paciente.

- Se for observado desgaste ou deterioração dos fios, descontinuar o uso do suporte.

5- Advertências para Suporte para Costas Modelo Clavícula

- Para uso somente em um único paciente.

- Se for sentido aumento da dor, inchaço, ou quaisquer reações adversas enquanto estiver usando este produto, consultar imediatamente seu médico.

- Ler cuidadosamente a advertências e as instruções de uso/cuidado antes de usar.

- Este dispositivo não prevenirá ou reduzirá todos os danos. A reabilitação e a modificação de atividade são também uma parte essencial de um programa de tratamento seguro.

Precauções para Armazenagem e Transporte

Transportar em sua embalagem original. Evitar a exposição á água, luz solar direta, temperaturas extremas e umidade elevada durante a armazenagem.

Armazenar em locais protegidos de umidade e sob temperatura entre 0°C e 50°C.

Contra-Indicações

O Suporte para Costas não deve ser usado em casos de gravidez, condições de circulação pulmonar, cardiovascular ou esquelética que tem o risco de piorar a situação como um resultado de compressão e/ou pressão na cintura.

Efeitos Adversos: Não se aplica

Fabricado por:

BREG INC

2611 Commerce Way, Vista, Califórnia - Estados Unidos - 92081

Importado e Distribuído por:

ORTHOFIX do Brasil Ltda.

Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros

São Paulo - SP - CEP: 05410-002

CNPJ: 02 690.906 / 0001-00

Registro ANVISA.: 10392060064

Responsável Técnico: Vanessa Moraes Esteves – CREA-SP: 5063016170

Informações ao Consumidor: Fone: (011) 3087-2266